

NUMAX-PATENT-URINAL


INH. S.+ B. Ammon ° Bäumlisackerweg 17 ° CH-3274 Merzligen ° Tel / Fax +41 (0)32 323 16 01
www.inkontinenz-schweiz.ch / www.numax.ch / E/Mail numax@numax.ch

NUMAX PATENT URINAL

Swiss made

Langmanschette ohne Entleerung


Best. Nr. M-24-00.1/ od.2/od.3 **4**

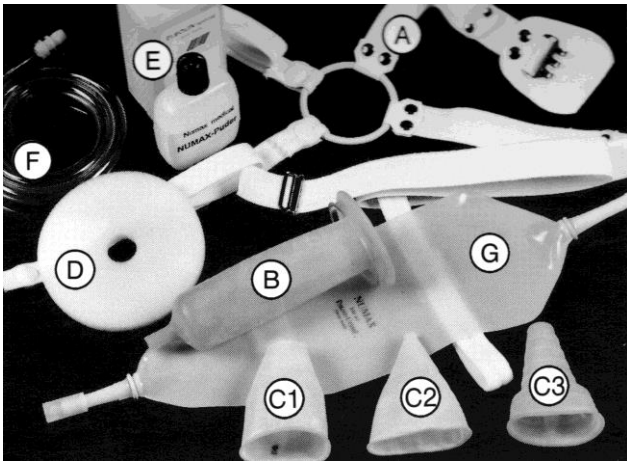

Set-Inhalt :


- A Verstellbare Hüftbandage (inkl. Montierte)
- B Langmanschette mit Entleerungsventil
- C1 Manchette Gr. 2
- C2 Universal-Manschette
- C3 Stufen-Manschette
- D Polsterring
- E NUMAX-Pflegeset
- F Verbindungsschlauch
- G Beinbeutel 800ml 1 Beinband

1. Schritt : Einstellen der Länge der Hüft-Bandage

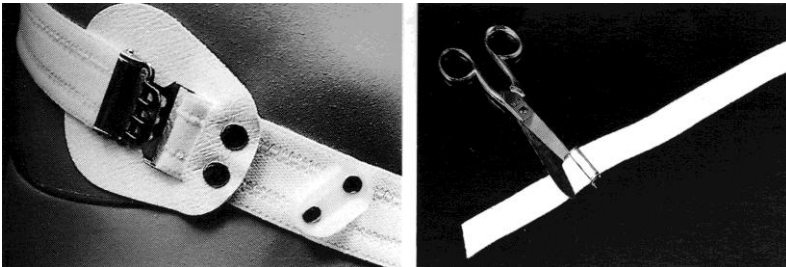


Hüft-Bandage ohne Langmanschette umschnallen. Mit der verstellbaren Schnalle eine angenehme Weite einstellen. Ueberstehendes Elastic-Band direkt bei der Schnalle mit der Schere abschneiden.

2. Schritt : Einstellen der Länge der Bein-Bandage

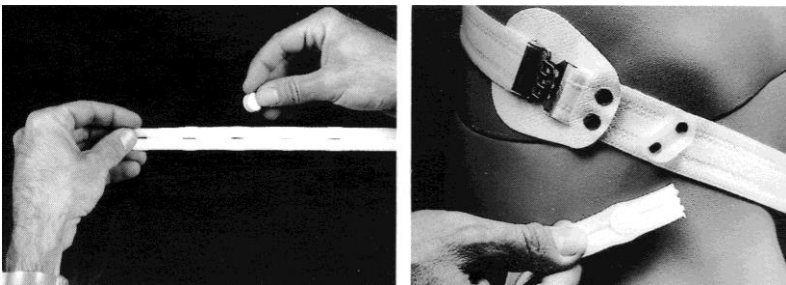


Die Doppelknöpfe können im Knopflochband an der gewünschten Stelle eingehakt werden. Doppelknopf in den speziellen Knopfhalter an der Hüft-Bandage einhängen. Ueberstehendes Knopflochband mit der Schere schräg abschneiden. Bandage ausziehen.

3. Schritt : Manschette vorbereiten

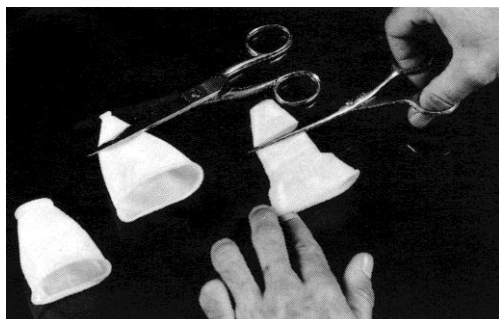

Dem Set liegen verschiedene Manschetten Typen bei. Die Manschette wird später mit der Langmanschette verbunden. Es ist wichtig, jetzt zu bestimmen, ob sie passt. D.h. sie sollte am Penis gut anliegen, ohne einzuschnüren. Eventuell passt die im Set enthaltene Manschette Gr.2 (auch in den Grössen 1-8 erhältlich), falls nicht, so verwenden Sie die Universal-Manschette oder die Stufen-Manschette. Diese müssen jedoch von Ihnen mit einer Schere auf die passende Öffnungsweite abgeschnitten werden. Ob Sie die Universal- oder die Stufen-Manschette verwenden, spielt keine Rolle, wichtig ist, dass sie gut sitzt, und Sie sich wohl fühlen.

4.Schritt : Manschette montieren

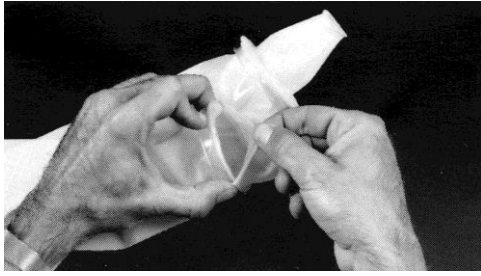



Die Manschette gleichmässig auf den Tragring der Lang- Manschette aufziehen.

5. Schritt : Hüft-Bandage und Langmanschette miteinander verbinden



Die Langmanschette (inklusive der Montierten Manschette) von hinten in den Gummiring der Hüft-Bandage ziehen.

6. Schritt : Anziehen

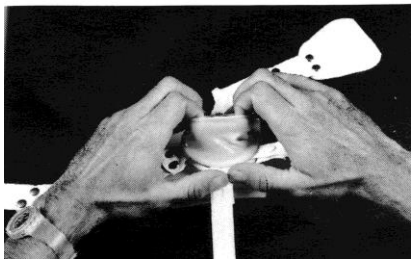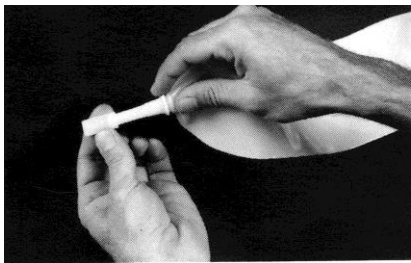

Penis pudern,um ein müheloses Einführen zu ermöglichen. Entleerungsventil öffnen. Dazu Auslaufhülse nach vorne ziehen. Den Polsterring direkt über den Penis ziehen,so erreichen Sie maximalen Tragkomfort. Manschette etwas auseinanderziehen und über Penis stüpen. Kontrollieren Sie,ob die Manschette gut sitzt. Das fertig montierte Urinal mit Hüft-und Beinbandage umschnallen. Entscheiden Sie,ob Sie den Beinbeutel am Ober-oder Unterschenkel tragen wollen. Verbindungsschlauch auf die passende Länge zuschneiden und die Schlauchkupplung in die Langmanschette einstecken. Beinbeutel umschnallen und das freie Ende des Schlauches auf das Einlaufventil des Beinbeutels stecken. Entleerungsventil schliessen. Im Bett oder im Rollstuhl kann die Langmanschette,anstelle des Beinbeutels,mit einem Betturinalbeutel 2l oder mit einem Einwegbeutel verbunden werden.

Pflege :

Für die Reinigung und Pflege des NUMAX PATENT URINAL SYSTEMS empfehlen wir Ihnen **ELBOLIN-SPEZIAL**.

Diese Flüssigseife (die Flasche enthält 250ml) wurde speziell für NUMAX medical entwickelt.

In 40 Grad warmem Wasser und etwas ELBOLIN-Spezial können sämtliche Bestandteile gewaschen werden.

Achtung : Das Entleerungsventil muss während des Waschens geöffnet sein !.

Wichtig !

Die Kunststoff-Bestandteile des NUMAX Systems dürfen nie in zu heissem Wasser gespült werden !

Die optimale Verarbeitung der erstklassigen Materialien bietet Ihnen lange Sicherheit..

Verbrauchs-und Ersatzteile

Bitte das Bestell-Formular verwenden

Best.-Nr.	Artikel
M-35-00.1 bis 4	Langmanschette (je nach Grösse)
M-05-09.1 bis 8	Manschette (je nach Grösse)
M-05-09-00	Stufen-Manschette
M-05-09.0	Universal-Manschette
M-07-05.1	Polsterring
M-03-00.1	Hüftbandage komplett
M-13-00.1	Bein- Bandage
G-04-00.2	Verbindungsschlauch
G-01-00.1	Beinbeutel 800ml,2 Beinbandagen
G-03-10.1	Betturinalbeutel 2 l
G-06-00.1	ELBOLIN-Spezial 250ml
G-07-00.1	NUMAX-Puder